

Маска медицинская

Производитель: «Хельярд Хелс, Инк.», США. Halyard Heath, Inc., 5405 Windward Parkway, Alpharetta, Georgia 30004, USA
Сделано в Китае.

Рег. уд. №Ф33 2010/07702 от 24 ноября 2017 года.

Артикул 46727

Маска медицинская FLUIDSHIELD* PFR95* N95 MASK Класс защиты FFP3

Маска медицинская одноразовая «PFR 95» в форме респиратора (класс защиты FFP2) предназначена для применения в качестве профилактического средства защиты органов дыхания от инфекций (микроорганизмов, бактерий и вирусов), передаваемых воздушно-капельным путем и может использоваться медицинским персоналом, работникам медицинских противотуберкулезных учреждений, работниками детских учреждений, предприятий торговли и в бытовых условиях в случаях повышенной эпидемиологической опасности для предотвращения распространения инфекции.

Применение «PFR 95» рекомендуется: во время эпидемий, в местах большого скопления людей, при повышенном риске распространения инфекции воздушно-капельным путем;

Маску медицинскую «PFR 95» нельзя применять: • при недостаточно плотном прилегании к лицу, • в условиях дефицита кислорода в воздухе (менее 19%), в т.ч. в закрытых емкостях и колодцах • при затрудненном дыхании.

При производстве маски применяется уникальная соединительная технология «SONTEC II», при которой предусматривается мощная прокатка четырех слоев мягких и гибких материалов и при этом устраняется неудобства традиционных методов соединения материалов (склеивание, нагрев, сшивание и т.п.). В результате получается удобный, мягкий, не вызывающий раздражение кожи лица продукт.

Для обеспечения оптимального комфорта при использовании применяются тончайшие волокна на основе легких тканей, чем и достигается низкий уровень ΔP (ΔP - разница в давлении воздуха на внутренней и внешней стороне маски во время воздушного обмена). Это гарантирует необычайную легкость дыхания и максимальное удобство использования маски в течение длительного времени.

Способ применения «PFR 95»:



1. Отделите края респиратора, чтобы полностью открыть его.

2. Слегка согните фиксатор носа и сформируйте угол в области прилегающей к носу.

3. Извлеките и разверните резинки для фиксации маски

4. Разделите фиксирующие резинки.

5. Держа фиксирующие резинки указательными и большими пальцами, приложите респиратор внутренней стороной к подбородку.

6. Наденьте по очереди фиксирующие резинки на голову.

7. Нижнюю резинку расположите у основания шеи.

8. Верхнюю резинку наденьте на макушке головы.

9. Пальцами плотно прижмите носовой фиксатор для обеспечения герметичного прилегания.

10. Плотно прижмите края респиратора к лицу. И убедитесь в герметичности прилегания.

Способ применения «PFR 95»:

Предназначение: Маска медицинская «PFR 95» в форме респиратора отвечает требованиям к рабочим характеристикам EN 149:2001, тип FFP2. Предназначена для защиты от инфекций (микроорганизмов, бактерий и вирусов), передаваемых воздушно-капельным путем, а также определенных видов водяных аэрозолей (*водяные аэрозоли – это аэрозоли, образованные водяными растворами и/или взвесями твердых частиц в воде, при этом единственным загрязнителем воздуха является твердая фракция*).

Предупреждение: Не допускается использование данной маски для защиты от газов, паров или аэрозолей на основе растворителей; при проведении покрасочных работ методом распыления; в атмосфере с недостаточным содержанием кислорода (минимально допустимая концентрация кислорода – 19%); в замкнутом пространстве (т.е. там, где недостаточна вентиляция или где могут скапливаться газы, пары или аэрозоли в опасной концентрации); а также при наличии в воздухе вредных и ядовитых веществ в концентрациях, непосредственно угрожающих жизни или здоровью человека. Если маска загрязнена или затрудняет дыхание, замените ее на новую. Немедленно покиньте рабочее место, если испытываете головокружение или вам тяжело дышать. Наличие бороды или водяного покрова на лице может помешать маске плотно прилегать к лицу.

Храните неиспользованные маски в их оригинальной упаковке.